


DEKASEPTOL Gel


Prêt en un rien de temps.




Tuyau de la pompe à salive ou du brouillard de spray

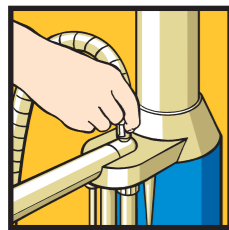


1. Aspirer par intermittence de l'eau froide par exemple par l'AQUAmat*, de KaVo ...

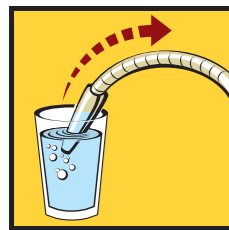


... ou dans un verre en plastique

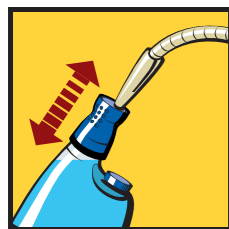

2. Abaisser le dispositif de dosage avec la pièce à main d'aspiration posée ou à la main

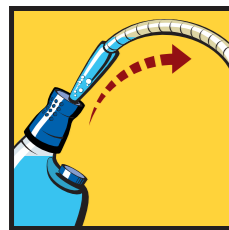


3. Aspirer le gel DEKASEPTOL du dispositif de dosage*
*si le tuyau de brouillard de spray est gros, répéter les étapes 1 à 3

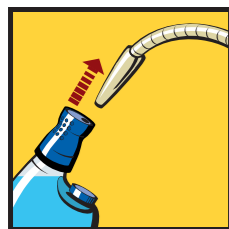

4. Retirer le tuyau et le replacer dans le support

Cuvette de crachoir

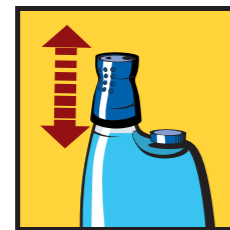

1. Abaisser le dispositif de dosage



2. Verser le gel DEKASEPTOL dans la cuvette de crachoir



3. Répartir le gel DEKASEPTOL avec une brosse et le laisser agir



4. Puis rincer à l'aide du dispositif de rinçage de la cuvette et d'une brosse



Où est la noix de coco?

KaVo DEKASEPTOL Gel

Votre dépôt dentaire

Pour tous renseignements contactez-nous.
Informations également disponibles sur Internet: www.kavo.com



KaVo DEKASEPTOL Gel

Un système génial de nettoyage et de désinfection à base de noix de coco.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental GmbH, D-88400 Biberach/Riß - Telefon +49 73 51 56-0 - Fax +49 73 51 56-1488 - Internet: www.kavo.com



KaVo. Dental Excellence.

Mel-Nr. 1004-1238 05/02-11 fr. Sous réserve d'éventuelles modifications techniques. Les couleurs rendues sur le catalogue peuvent montrer une légère différence par rapport au véritable. © Copyright KaVo Dental GmbH.

DEKASEPTOL Gel

A vos marques!

Clarté & netteté dans la jungle de l'entretien.

Une zone dangereuse: l'installation d'aspiration. La saleté se dépose, les bactéries, les champignons et les virus s'installent et font la chasse à la santé. Combattez les germes avec les armes de la nature !

L'agent principal du DEKASEPTOL est la glucoprotamine – un dérivé des composants de la noix de coco. La glucoprotamine est un agent antimicrobien, largement supérieur en action et en profondeur aux biguanides ou aux dérivés de phénol. Un article propre et hygiénique pour l'installation d'aspiration, l'écoulement et la cuvette de crachoir.

Et pour vous une raison d'être rayonnant: car ce qui rend la vie dure aux bactéries et aux virus vous facilite vraiment le travail. Mais regardez vous-même !

Sûr – propre – économique – rapide:

- hautement efficace: bactéricide, tuberculocide, virulicide, fongicide
- économique: le bidon de recharge de 6 litres
- non-polluant: exempt d'aldéhyde, de phénol et de chlore
- un gain de temps: directement prêt à l'emploi grâce à une pompe de dosage
- pratique: pas de mélange
- figure sur la liste DGHM

DEKASEPTOL possède une action:

- **nettoyante**
- **désodorisante**
- **désinfectante:**

Bactéricide	✓	Tuberculocide	✓
Fongicide	✓	Anti-HBV	✓
Virulicide	✓	Anti-HIV	✓

Premier choix – meilleure qualité.

DEKASEPTOL Gel

Prêts!

Pas besoin de remuer, de secouer, ni de mélanger.

Economisez-vous un mélange qui prend du temps et une application compliquée! DEKASEPTOL est un mélange fini et directement prêt à l'emploi: immédiatement.

Ménagez-vous, vous et vos appareils. Pas de mélange signifie aussi: pas d'erreur de mélange, pas de contact avec vos mains sensibles, pas de surfaces de travail salies, pas de contrainte sur le matériel. Un travail propre.

Vraiment économique. Comme rien ne coule à côté grâce au dispositif de dosage économique, rien n'est gaspillé. Vous pouvez le remplir au mieux à l'aide du bidon de recharge avantageux de 6 litres.

Eliminez-le sans souci. Ce qui vient de la nature fait aussi bon ménage avec elle. DEKASEPTOL est neutre écologiquement, facilement et rapidement biodégradable conformément aux directives de l'OCDE.

DEKASEPTOL Gel

Partez!

Fini plus tôt – Plus de temps libre.

Gagnez du temps! DEKASEPTOL est maniable et rapide. Aspirez simplement le gel dans les tuyaux et versez-le dans la cuvette de crachoir. Laissez agir. Terminé.

Encore au cabinet après 20 heures? Plus maintenant ! Car vous économisez grâce à DEKASEPTOL de précieuses minutes par installation d'aspiration.

«Peanuts», dites-vous? Une réelle économie de temps, répondons-nous. Car si vous vérifiez, vous obtiendrez rapidement un gain de temps de 20 minutes dans la semaine.

Ce qui fait 2 journées entières de travail dans l'année. Du temps que vous pouvez vraiment mieux utiliser grâce à DEKASEPTOL. Plus tôt sorti, plus vite à la maison.



Recherche commune de KaVo et Henkel-ECOLAB

