

SNC Slide

Laveur-Désinfecteur par Ultrasons
(Conforme à la norme EN ISO 15883)

Appareil Automatique Incorporable sous plan de travail



Laveur-Désinfecteur
EN ISO 15883-1
(Dispositif Médical Classe IIb)

SNC Slide - Version Tiroir
Ouverture / Fermeture du Tiroir automatisée

Offre ADF 2016 : 9270.00 Euros TTC
(Kit accessoires offert)



GAMASONIC

BP 52 - Z.A.C. de l'Angaud - 63160 BILLOM - France - www.gamasonic.eu
Tél. 04 73 68 90 26 - Fax. 04 73 68 97 43 - Mail : gamasonic@orange.fr

Pupitre de commande



FONCTIONNEMENT

1 - OUVERTURE / FERMETURE DU TIROIR

L'ouverture et la fermeture du tiroir sur le Laveur - Désinfecteur SNC Slide s'effectue en appuyant sur l'interrupteur « Ouverture/Fermeture ».

2 - PRÉ - DÉSINFECTION

Cette phase doit impérativement être effectuée en amont de l'appareil. En aucun cas, cette étape ne peut-être effectuée à l'intérieur de l'appareil SNC Slide.

3 - AUTOMATIQUE : Durée totale du cycle ≈ 55 min

Chronologie du cycle :

- ▶ Rinçage en eau claire sous Ultrasons
- ▶ Nettoyage sous Ultrasons avec le produit DETERBAKT®
- ▶ Rinçage en eau claire sous Ultrasons
- ▶ Rinçage en eau claire sous Ultrasons avec le produit DPH 21
- ▶ Séchage par air chaud

INSTALLATION DE L'APPAREIL : (voir documents technique)

L'appareil SNC Slide s'installe sous un plan de travail dans un module de meuble de 60 cm de largeur.

Son fonctionnement nécessite une alimentation électrique de 220V avec terre, une vidange type « machine à laver », une arrivée d'eau du réseau bactériologiquement contrôlée et filtrée raccordée sur un robinet type machine à laver (20/27) ainsi qu'une arrivée en air comprimé d'une valeur de 6 bars avec air filtré sur détendeur.

Les bidons de produits sont raccordés et entreposés sur le côté droit de l'appareil. Le niveau bas des bidons est visualisé sur le tableau de commande.

L'appareil SNC Slide ne se substitue pas à une stérilisation des instruments après leurs nettoyage.


**EN FIN DE MISE EN SERVICE,
LAISSER L'APPAREIL EN ÉTAT DE PROPRETÉ**
(cuve rincée et essuyée)

CE₀₄₉₉
Classe IIb (année 2015)



SNC Slide

***Ouverture / Fermeture
du tiroir automatisée***

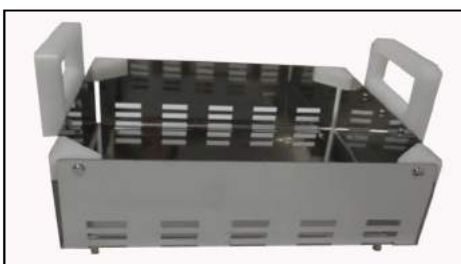

Panier P12

(Pour instrumentation de type "VRAC")

Capacité ~ 15 patients



Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos appareils dans le but de toujours mieux servir notre clientèle.

- Fabricant Français -

GAMASONIC

BP 52 - Z.A.C. de l'Angaud - 63160 BILLOM - France - www.gamasonic.eu
Tél. 04 73 68 90 26 - Fax. 04 73 68 97 43 - Mail : gamasonic@orange.fr