

Arrêt d'activité : Que dois-je faire ?

Check-list



Un nombre croissant de cabinet dentaire doivent fermer temporairement en raison de la propagation du coronavirus. Si les cabinets doivent fermer, la liste de contrôle suivante est conçue pour vous fournir toutes les informations pour préparer au mieux les unités DÜRR DENTAL que vous utilisez. Les étapes que nous recommandons de prendre, vont du

nettoyage et de la désinfection minutieux des compresseurs, des aspirations et de la vérification des paramètres des appareils à rayons X. Et si vous avez des travaux de maintenance en cours ou que vous attendez une unité de remplacement, nous pouvons vous offrir une variété d'options. En tant que partenaire fiable, DÜRR DENTAL restera toujours à vos côtés.



Notre priorité absolue est de s'assurer que tous les produits seront en parfait état de fonctionnement lorsque votre cabinet rouvrira.

Arrêt d'activité : Que dois-je faire ?

Check-list

Produit : Equipement

Produit	Mesures requises	✓	Nos conseils pour une fiabilité de fonctionnement
Aspiration	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyer le système d'aspiration avec le produit de nettoyage MD 555 (noter les spécifications relatives à la concentration et au temps de réaction, rincer à l'eau après le nettoyage) Désinfecter le système d'aspiration avec Orotol® plus (NE PAS rincer à l'eau après la désinfection) Appuyer sur le bouton de nettoyage de la valve du crachoir et nettoyer le filtre jaune (remplacer si nécessaire) Remplacer les filtres jetables jaunes sur le support de tuyaux Couper l'alimentation en eau de l'unité de rinçage, vidanger l'eau Nettoyer le filtre jaune sur l'entrée de l'unité d'aspiration (systèmes d'aspiration humides seulement) Changer le contenant de collecte de l'amalgame sur le récupérateur d'amalgame (si vous avez un récupérateur d'amalgame) Retirer toutes les pièces à main aspirantes du tuyau pour démarrer l'unité d'aspiration. Faire fonctionner l'aspirateur pendant au moins 30 minutes pour sécher les tuyaux d'aspiration. Nettoyer et désinfecter les pièces à main conformément aux renseignements du fabricant. 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>» Maintenance avec kits de maintenance pour:</p> <p>unités d'aspiration et séparateurs d'amalgame disponibles chez votre revendeur</p> <p>» remplacer si l'utilisation d'un filtre bactériologique (contacter votre revendeur)</p> <p>» Nouvelle machine d'aspiration Pour une meilleure aspiration du brouillard de spray</p>
Compresseur	<ul style="list-style-type: none"> Allumer l'appareil et attendre que la pression de coupure soit atteinte Pendant que le compresseur fonctionne, ouvrir la vanne de vidange des condensats de l'unité de séchage membranaire. Une fois que toute l'eau de condensation s'est échappée, fermer la vanne . Ouvrir la vanne de vidange de la cuve. Une fois la pression de démarrage atteinte, le compresseur s'allume. Lorsque le compresseur est sous tension et que la vanne de vidange du condensat est ouverte, attendre qu'il n'y ait plus d'eau de condensation. Fermer la vanne de vidange des condensats lorsqu'il n'y a plus d'évacuation d'air Débrancher l'alimentation électrique du compresseur Débrancher le raccord d'air comprimé du raccord automatique 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>» Remplacement des filtres du compresseur</p> <p>Set de filtre pour une meilleur performance (existe en filtre stérile)</p> <p>» Maintenance avec kit de maintenance Contacter votre revendeur</p>
Hygoclave	<ul style="list-style-type: none"> Laisser la porte entrouverte pour libérer le joint de la porte et prévenir la fatigue prématurée ou tout collage Débrancher la prise de courant Vidanger, nettoyer, et si nécessaire, désinfecter les réservoirs internes d'eau propre et d'eaux usées (FD 366) Couper l'alimentation en eau en cas d'utilisation d'un système de traitement de l'eau (hygodem ou hygopure) 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Hygowater®	<ul style="list-style-type: none"> Couper l'alimentation en eau Éteignez l'appareil Faire chuter la pression de l'unité en faisant couler la seringue 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	



Veillez prendre note des recommandations de sécurité et de l'équipement de protection. Après avoir terminé tous les travaux, vérifiez que tous les appareils sont hors tension et déconnecter! Lors du redémarrage des appareils, respectez les informations contenues dans les instructions d'utilisation.

Vous trouverez toutes les instructions d'utilisation et d'autres informations dans notre Centre de téléchargement à www.duerrdental.com/downloadcenter

Arrêt d'activité : Que dois-je faire ?

Check-list

Produit : Imagerie

Produit	Mesures requises	✓	Nos conseils pour une fiabilité de fonctionnement
Scanner VistaScan	<ul style="list-style-type: none"> Recouvrir le scanner de la housse pour le protéger de la poussière Contrôle radiologique mensuel (dans les pays où le contrôle est obligatoire) <ul style="list-style-type: none"> Si des images ont été conservées pendant plus d'une semaine, effacer avant l'utilisation Inspectez les plaques d'image pour voir si elles sont endommagées 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	» Remplacer les films abîmés » Maintenance avec les kits de maintenance Kits (VistaScan Perio et VistaScan Mini) . Contacter votre revendeur
Radio VistaPano	<ul style="list-style-type: none"> Contrôle radiologique mensuel (dans les pays où le contrôle est obligatoire) Mettre la radio en position initiale (position de départ) Nettoyer et désinfecter les surfaces comme décrit dans la notice (FD 366) 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Cone beam VistaVox	<ul style="list-style-type: none"> Contrôle radiologique mensuel (dans les pays où le contrôle est obligatoire) Mettre la radio en position initiale (position de départ) Nettoyer et désinfecter les surfaces comme décrit dans la notice (FD 366) 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Générateur X-RAY VistaIntra	<ul style="list-style-type: none"> Mettre la radio en position initiale (position rabattue) Nettoyer et désinfecter les surfaces comme décrit dans la notice (FD 366) 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Caméra Intraoral VistaCam	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyer et désinfecter les surfaces comme décrit dans la notice (FD 366) 	<input type="checkbox"/>	
Capteur VistaRay	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyer et désinfecter les surfaces comme décrit dans la notice (FD 366) 	<input type="checkbox"/>	
Software			
X-ray film Développeuses	<ul style="list-style-type: none"> Vider les chimies et rincer à l'eau Laisser la machine sécher 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	



Veuillez prendre note des recommandations de sécurité et de l'équipement de protection. Après avoir terminé tous les travaux, vérifiez que tous les appareils sont hors tension et déconnecter! Lors du redémarrage des appareils, respectez les informations contenues dans les instructions d'utilisation..

Vous trouverez toutes les instructions d'utilisation et d'autres informations dans notre Centre de téléchargement à www.duerrdental.com/downloadcenter